

Detergente naturale di origine vegetale



KOKONAT 2.0 – Endo Natural Cleaner

- Naturale
- Efficacie
- Facile risciacquo
- Non contiene alcol

DESCRIZIONE

KOKONAT 2.0 è un detergente naturale a base di tensioattivi anionici di origine vegetale ottenuti grazie alla biotecnologia. L'abbassamento della tensione superficiale del liquido e la formazione di micelle rimuovono efficacemente lo sporco dalle superfici. KOKONAT 2.0 può essere utilizzato su qualsiasi superficie e materiale. Si risciacqua facilmente con poca acqua e non contiene alcol.

COMPOZIONE

<i>Ingrediente</i>	<i>% p/p</i>
Acqua	82.6
Tensioattivi Anionici di origine vegetale	1.4
Carbossilati	16.0

APPLICAZIONI

Pulizia manuale e automatica di dispositivi medici e loro accessori (endoscopi, strumenti chirurgici, ecc.). Il prodotto può essere utilizzato anche in apparecchi ad ultrasuoni.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Lavaggio manuale o in vasche a ultrasuoni

Diluire 1:500 (2ml ogni litro di acqua). Immergere il dispositivo nella soluzione per 5 minuti; in presenza di residui organici persistenti e/o essiccati da tempo, raddoppiare la concentrazione e il tempo di immersione.

Risciacquare con acqua.

Il prodotto può essere diluito in acqua del rubinetto.

CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto nei contenitori originali. Stoccare in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5 e 30 °C, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall'esposizione diretta ai raggi solari.

Tenere i recipienti ben chiusi. Garantire un'adeguata ventilazione dei locali.

Il prodotto conserva la sua efficacia fino a 24 mesi dalla data di produzione.

Detergente naturale di origine vegetale

SICUREZZA E IMPATTO AMBIENTALE

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Prodotto non infiammabile.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CONFEZIONAMENTO

Codice Ordine	Modello
DT-KKN2-5000	Tanica da 5 litri
-	Confezione da 4 taniche da 5 litri

SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO

Soggetto a disposizioni locali. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

DIRETTIVE E CONFORMITÀ

Questo prodotto è conforme a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici.

Classificazione secondo Regolamento (UE) 2017/745 Articolo 51 - Allegato VIII regola 1

Classe I

CND: Z12029085
RDM: 2432134/R
Basic UDI-DI: 805053900DT-KKN266
UFI: FR10-90JY-FOOD-2EWX